

## INDICE


Descrizione	2
Prestazioni e impostazioni	3
Optional	5
Scheda tecnica	7
Video e informazioni sito internet	8

## Sbarazzati della tensione con **TENSOR**

Stress? **Ansietà?** Stanchezza? **Cattiva circolazione?**  
Dolori muscolari? **Ritenzione idrica?**

Osserva tutti i dettagli e le prestazioni di un lettino che permette combinare insieme sia massaggi rilassanti sia trattamenti per dolori moderati.

Scopri il lettino SPA **Tensor** all'interno.

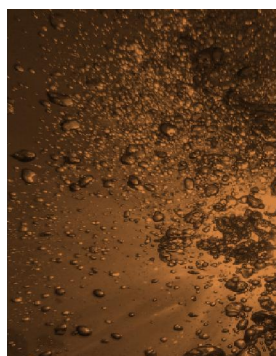

## Descrizione

Il lettino Tensor è stato specialmente disegnato per effettuare trattamenti a corpo intero e si integra perfettamente in spazi Wellness e Spa. Dall'aspetto elegante e minimalista, il morbido materasso da un unico pezzo e 13 cm di spessore offre un gran comfort ai pazienti. I bordi smussati e il tatto del rivestimento trasmettono una sensazione di relax e benessere in qualsiasi ambiente.

Si tratta di un lettino a 3 sezioni fornito di 4 motori che regolano l'altezza, l'inclinazione dello schienale, del gambale e di tutto il materasso e grazie a ciò può adottare la posizione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg.



Le eleganti colonne di alluminio o laccate marroni conferiscono la massima stabilità al lettino.

La struttura che sorregge il materasso è tappezzata con lo stesso rivestimento, dandogli quel tocco in più di qualità.



## Prestazioni

Mediante il telecomando di serie o la pedaliera (optional) è possibile regolare quasi tutti i movimenti del lettino.



L'ampio rango di altezza (da 68 cm a 89 cm) del lettino ne favorisce l'accesso al paziente.




L'inclinazione del gambale e dello schienale permette di svolgere un'ampia varietà di trattamenti in posizione supina.



La posizione Anti-Trendelenburg favorisce la scesa dei pazienti anziani e/o con mobilità ridotta dal lettino.



La posizione Trendelenburg si utilizza molto nei trattamenti di drenaggio linfatico per migliorare la circolazione sanguigna e ridurre la ritenzione idrica.

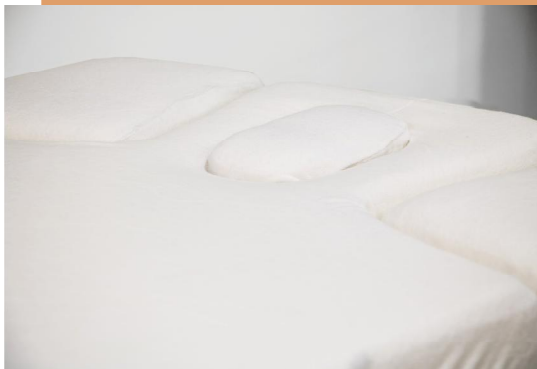


Il poggiatesta è dotato del foro facciale perché il paziente si senta totalmente comodo nei trattamenti in posizione prona.



Gli appoggia-braccia si regolano in altezza tramite un pistone a gas, oltre ad essere utili al professionista nei massaggi facciali.



## Impostazioni

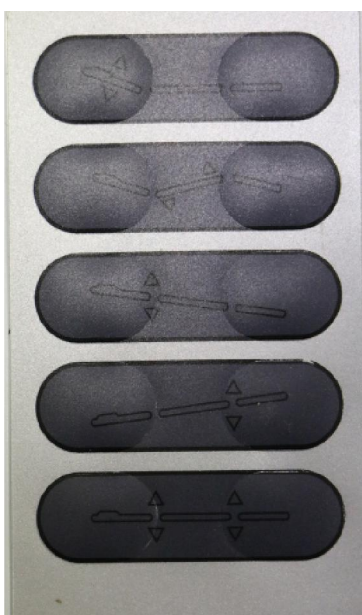

Premendo il tasto superiore si regola l'inclinazione dello **schienale**.

Premendo il secondo tasto si regola l'inclinazione del **gambale**.

Premendo il terzo tasto si regola l'inclinazione di tutto il lettino in posizione **Trendelenburg**.

Premendo il quarto tasto si regola l'inclinazione di tutto il lettino in posizione **Anti-Trendelenburg**.

Premendo il quinto tasto si regola l'**altezza** del lettino.

## Optional

### TELAIO MARRONE

È già disponibile con la referenza **Tensor BROWN BASE**, lettino dal rivestimento bianco e la base laccata marrone.



### COPRILETTINO

Proteggi il tuo lettino con un coprilettino a 4 parti specialmente disegnato per il Tensor.



### RUOTE DI GOMMA

Per spostare comodamente il lettino, Weelko offre delle ruote di gomma con freno che girano a 360°.



## Completa il tuo spazio

I carrelli in legno bianco o marrone completeranno lo spazio insieme al tuo lettino Tensor.

**EASY+ (Ref. 1019)**



**ASSIST (Ref. 1034)**



**HANDY (Ref. 1032)**




**VANTAGE (Ref. 1033)**




## Scheda tecnica

Altezza	68 / 89 cm
Larghezza	76 cm
Lunghezza totale	198 cm
Dimensioni della base	121x54 cm
Spessore del materasso	13 cm
Angolo d'impostazione schienale	0°~+70°
Angolo d'impostazione gambale	0°~-20°
Appoggia-braccia regolabili	Sì, in altezza (±10 cm)
Foro facciale	Sì
Capacità di carica	200 kg
Rivestimento	PU
Numero di motori	4
Telecomando	Sì (di serie)
Ruote	optional
Referenza	2249 / 2249 brown base
Tensione nominale	220 V / 240 V
Frequenza	50/60 Hz
Assorbimento	0,12 kWh
Peso netto	104 kg
Peso lordo	124 kg
Dimensioni imballo	204x81x72 cm
Montaggio	Si consegna già montato

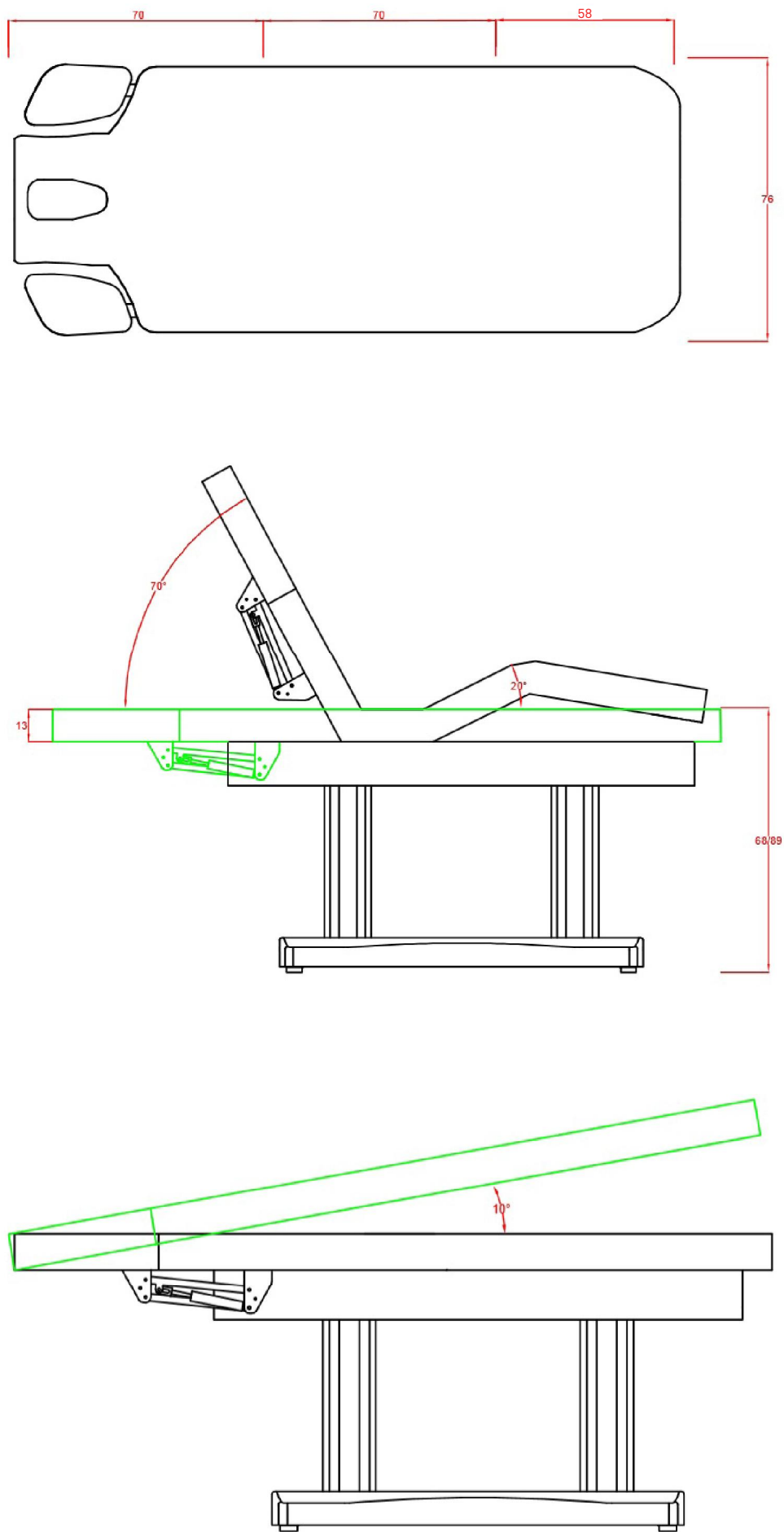



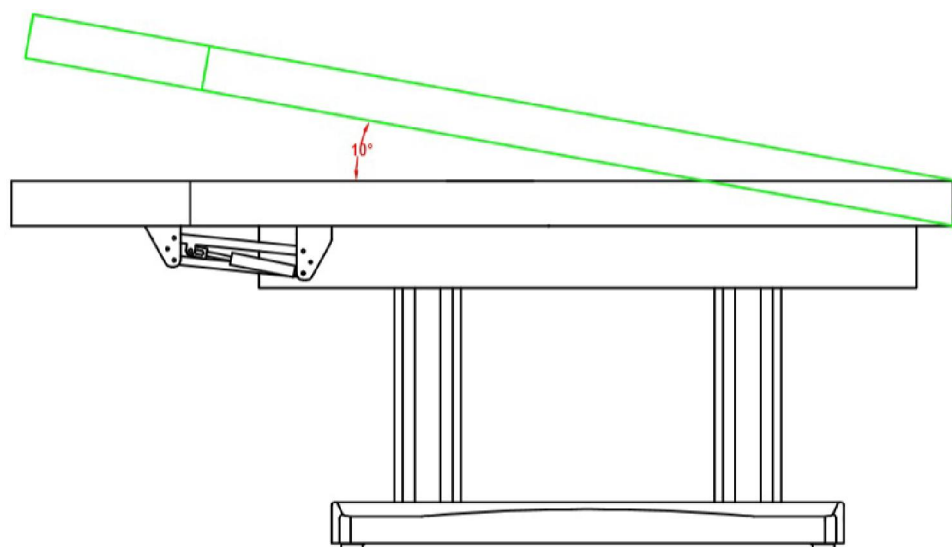


### Video e informazioni sito internet

Per scoprire tutti le particolarità del lettino e osservarne tutti i dettagli da vicino, mettiamo a tua disposizione un video che ne mostra tutte le prestazioni e la qualità delle rifiniture.

Attraverso i canali vimeo e youtube non solo puoi riprodurre, ma puoi anche scaricarlo e farlo vedere ai tuoi clienti o pubblicarlo nei tuoi consueti canali di vendita\*.

E ricorda che Weelko pubblica regolarmente video e informazioni tecniche sui suoi prodotti. Non farteli scappare!

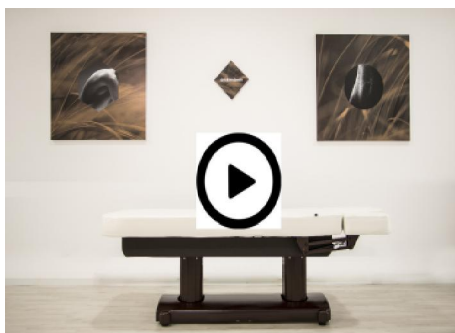


\* Weelko Barcelona SL autorizza l'utilizzo di materiale grafico e dei video con scopi commerciali a condizione che non vengano sottoposti a nessuna modifica né tagli.





Visita il nostro TECHNICAL INFO e scarica tutta l'informazione tecnica e commerciale di cui hai bisogno. Fotografie, dossier, schede tecniche, ecc. Non farteli scappare!

Dossiers | Technical Zoom

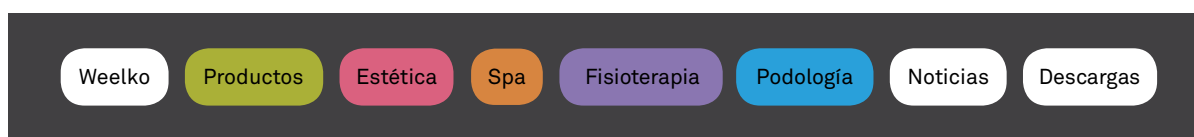

Accendi WEELKO TV su weelko.com e scoprirai da vicino il lettino SPA **Tensor**. Per chi preferisce un'immagine invece di mille parole!



**vimeo**

**You Tube**



Presoterapia Weelko



Demo sillón de spa Caln



Microdermabrasion Weelko

[weelko.com](http://weelko.com)

Barcelona  
Pol. Ind. La Valldan  
Camí de Garreta, 92  
08600 Berga  
Barcelona – Spain  
T. +34 93 824 90 20